

SOMNIA 03''

POSTURE PILLOW OREILLER POSTURAL

MAJ: 2023/02

Confort dorsal

Dormir sur le dos en toute stabilité nécessite un oreiller avec une conception basée sur les caractéristiques arrières du corps.

Anatomiquement profilé

Un appui complet et précis depuis la région des trapèzes permet de reposer les épaules en position couchée sur le dos.

Support cervical

Un support accru du cou aidera à maintenir une courbe cervicale appropriée et à en limiter les tensions.

Alignement naturel

Maintenir confortablement la tête plus basse, en position de sommeil sur le dos, procure une posture idéale et reposante.



SPÉCIFICATIONS

Utilisation

Simplement aligner la courbe la plus élevée de l'oreiller avec la région cervicale. Cette section de l'oreiller comporte un renfort haute densité réduisant les tensions cervicales. La pointe biseautée de la section cervicale permet un appui accru des trapèzes. Bien que l'épaisseur, les proportions et le renfort de l'oreiller favorisent la position sur le dos, il n'est pas décommandé de dormir dans une autre position avec le Somnia 03'', si vous êtes confortable.

Régions soutenues

Tête – Cervicale

Mesures

Largeur 22 pouces / Longueur 14 pouces / Hauteur 03 pouces

Composition

Mousse viscoélastique (mousse mémoire) haute densité, infusée de gel.

Recouvrements

NOIX DE COCO: Lanoix de coco est une fibre textile au confort inégalé, antibactérienne et hypoallergénique et elle respire et absorbe l'humidité, ce qui diminue les effets de chaleur nocturne.

Entretien

La housse en noix de coco est lavable à la machine (eau froide). Séchage à plat recommandé. Ne pas repasser ou laver avec du javellisant. Des housses de remplacement sont disponibles auprès de votre détaillant.

Garantie

Orthex Canada inc. garanti votre coussin pour une période de cinq ans à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication ou de matériel. Si celui-ci est trouvé défectueux par Orthex, il sera remplacé par le même modèle ou équivalent.

ASTUCES

Est-ce que l'oreiller fonctionne même si je bouge la nuit?

Oui, mais il est conçu pour stabiliser la position de sommeil

Je ne sais pas dans quelle position je dors

La façon que l'on s'endort est notre position de sommeil de choix.

ORTHEX Canada inc.
4448 Grande-Allée
Boisbriand (Qc) J7H 1R9
1.855.818.8482 | info@orthex.ca

ORTHEX
LE CONFORT INNOVÉ