


## TOILE HYGIÉNIQUE #470

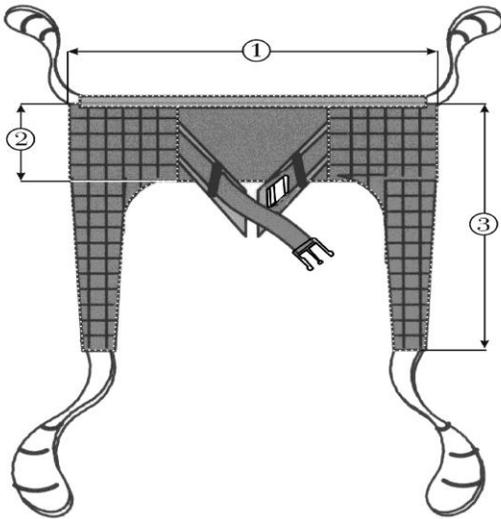

| GRANDEUR DE LA TOILE | COULEUR DU PREMIER CROCHET | DIMENSIONS APPROXIMATIVES |            |            |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------|
|                      |                            | 1 (pce/cm)                | 2 (pce/cm) | 3 (pce/cm) |
| EXTRA PETIT          | LILAS                      | 36/90                     | 9/22.5     | 31/77.5    |
| PETIT                | ROUGE                      | 38/96.5                   | 9.5/23.75  | 32.5/81.25 |
| MOYEN                | VERT                       | 40/100                    | 10/25      | 34/85      |
| GRAND                | JAUNE                      | 43/107.5                  | 10.5/26.25 | 36/91.5    |
| EXTRA GRAND          | BLEU ROYAL                 | 45/112.5                  | 11/27.5    | 37.5/93.75 |

## ENTRETIEN DE LA TOILE

### INSPECTER AVEC SOIN AVANT CHAQUE USAGE

- S'assurer que la toile est adaptée au besoin du bénéficiaire (modèle, grandeur, poids)
- Examiner la toile à intervalles réguliers tel que prescrit
- Suivre les instructions d'installation
- Un usage normal et en suivant les instructions de lavage et de séchage prolonge la durée de vie de la toile.
- 

### LAVAGE ET DE SÉCHAGE DE LA TOILE

 Laver à la machine à l'eau tiède avec un **savon doux** à **basse température ne dépassant pas 25°C ou 90°F** pendant au moins **trois minutes**.



Ne pas utiliser de javellisant et de chlorure.



Ne pas sécher à la sècheuse. Sécher à une **température maximale de 25°C ou 90°F**.

**NE PAS APPLIQUER DE PRESSION MÉCANIQUE OU TOUTE AUTRE PRESSION. NE PAS TORDRE LE TISSU.**



Ne pas repasser.