


## DOUBLE CUISSARDES #3624 SANS APPUI-TÊTE

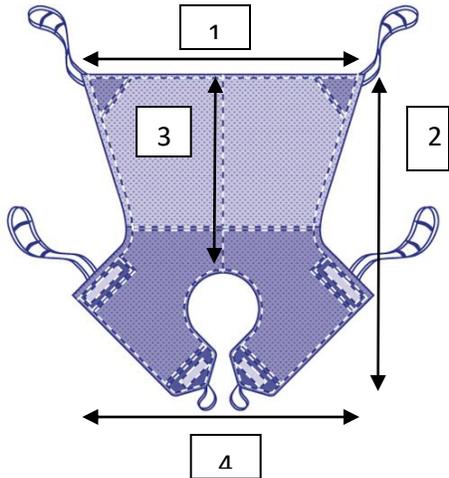

GRANDEUR DE LA TOILE	COULEUR DU PREMIER CROCHET	DIMENSIONS APPROXIMATIVES			
		1 (pce/cm)	2 (pce/cm)	3 (pce/cm)	4 (pce/cm)
EXTRA PETIT	LILAS	30/75	36/90	22/56	37.5/93.75
PETIT	ROUGE	32/80	38/95	23/57.5	40/100
MOYEN	VERT	33.5/83.75	42/105	25/62.5	42/105
GRAND	JAUNE	35.5/88.75	45/112.5	26/65	46/115
EXTRA GRAND	BLEU ROYAL	37/92.5	47/117.5	28/70	47/117,5

## ENTRETIEN DE LA TOILE

### INSPECTER AVEC SOIN AVANT CHAQUE USAGE

- S'assurer que la toile est adaptée au besoin du bénéficiaire (modèle, grandeur, poids)
- Examiner la toile à intervalles réguliers tel que prescrit
- Suivre les instructions d'installation
- Un usage normal et en suivant les instructions de lavage et de séchage prolonge la durée de vie de la Toile

### LAVAGE ET DE SÉCHAGE DE LA TOILE

 Laver à la machine à l'eau tiède avec un savon doux à basse température ne dépassant pas 25°C ou 90°F pendant au moins **trois minutes**.



Ne pas utiliser de javellisant et de chlorure.



Ne pas sécher à la sècheuse. Sécher à une température maximale de 25°C ou 90°F.

**NE PAS APPLIQUER DE PRESSIION MÉCANIQUE OU TOUTE AUTRE PRESSIION. NE PAS TORDRE LE TISSU.**



Ne pas repasser.