


DOUBLE CUISSARDES #630 SANS APPUI-TÊTE

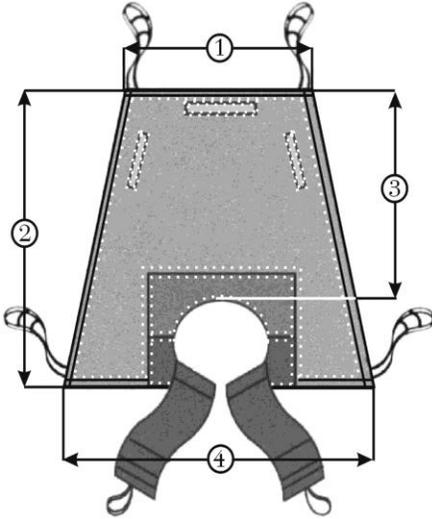

GRANDEUR DE LA TOILE	COULEUR DU PREMIER CROCHET	DIMENSIONS APPROXIMATIVES			
		1 (pce/cm)	2 (pce/cm)	3 (pce/cm)	4 (pce/cm)
EXTRA PETIT	LILAS	25/62.5	33/82.5	21/52.5	30/75
PETIT	ROUGE	26/65	35/87.5	22/55	32/80
MOYEN	VERT	28/70	38/95	24/60	34/85
GRAND	JAUNE	30/75	39/97.5	25/62,5	36/90
EXTRA GRAND	BLEU ROYAL	31/77.5	42/105	27/67.5	38/95

ENTRETIEN DE LA TOILE

INSPECTER AVEC SOIN AVANT CHAQUE USAGE

- S'assurer que la toile est adaptée au besoin du bénéficiaire (modèle, grandeur, poids)
- Examiner la toile à intervalles réguliers tel que prescrit
- Suivre les instructions d'installation
- Un usage normal et en suivant les instructions de lavage et de séchage prolonge la durée de vie de la Toile

LAVAGE ET DE SÉCHAGE DE LA TOILE

 Laver à la machine à l'eau tiède avec un savon doux à **basse température ne dépassant pas 40°C ou 104°F** pendant au moins **trois minutes**.



Ne pas utiliser de javellisant et de chlorure.



Ne pas sécher à la sècheuse. Sécher à une **température maximale de 25°C ou 90°F**.

NE PAS APPLIQUER DE PRESSIION MÉCANIQUE OU TOUTE AUTRE PRESSIION. NE PAS TORDRE LE TISSU.



Ne pas repasser.