


## Description

Cette toile est large et haute au dos et convient à l'usage avec les lève-personnes de type « Toile à Boucles » ArjoHuntleigh. Le support de tête intégré est incorporé à la conception de la toile. Cette toile soutient entièrement le corps et la tête. Elle est particulièrement utile pour les patients dont le corps et la tête ont peu de tonus. Cette toile permet de placer le patient en position assise la plus droite possible. Les bras du patient doivent demeurer à l'intérieur en tout temps.

## Toile combi

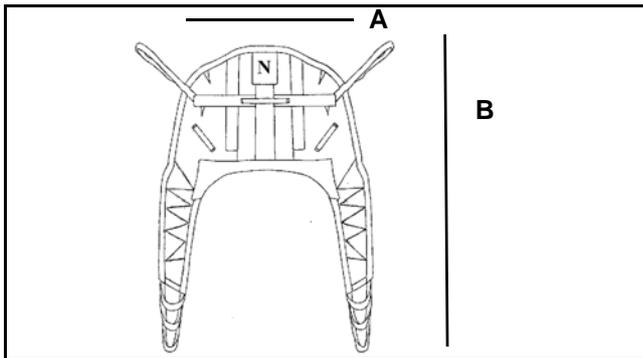

## Numéro de pièce et modèle

626002C - Toile Combi de luxe pour enfant et  
626002C-M - Toile Combi de luxe pour enfant de  
type « filet »  
(recommandés pour les patients de 20 à 45 kg /  
45 à 100 lb)

A: 81 cm/32 po  
B: 137 cm/54 po

626002 et 626002M  
(recommandés pour les patients de 45 à 90 kg /  
100 à 200 lb)

A: 91 cm/36 po  
B: 152 cm/60 po


626003 et 626003M  
(recommandés pour les patients de 90 à 272 kg /  
200 à 600 lb)

A: 118 cm/46 po  
B: 176 cm/70 po

## Positionnement de la toile


### Position assise

- 1) Alignez le centre de la toile avec la colonne vertébrale du patient. L'ouverture en U de la toile doit être placée sur le coccyx du patient.

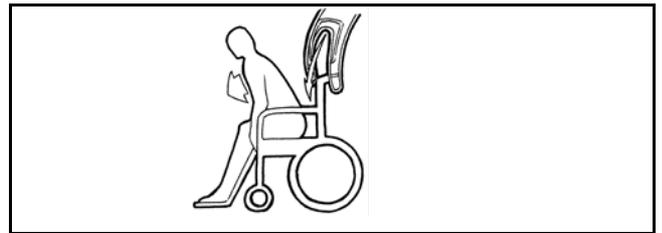


### Patient allongé sur le dos

- 1) Roulez le patient doucement sur le côté. Placez la toile pliée en deux sur le sens de la longueur, sous la colonne vertébrale du patient. L'ouverture en U de la toile doit être placée sur le coccyx du patient.

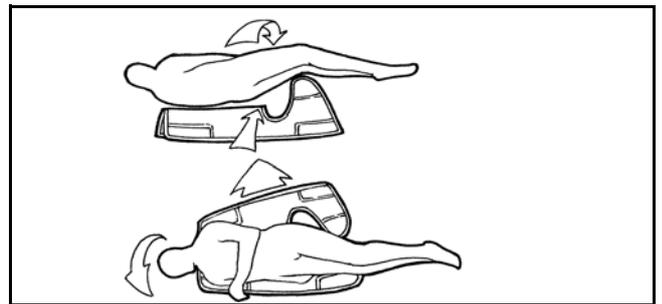

- 2) Passez les courroies les plus courtes par-dessus la hanche, puis sous les cuisses. Croisez les courroies l'une par-dessus l'autre.

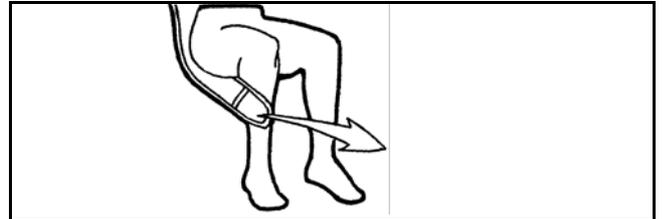

- 3) Passez les longues courroies à l'intérieur des courtes pour former un pont par-dessus les courroies des jambes du patient (voir option 1 à la page suivante).

### Position du patient selon la couleur des courroies

	Épaules	Jambes
	Jaune	Blanc
	Vert	Blanc
	Blanc	Noir
	Blanc	Orange

# Caractéristiques de la toile combi



## OPTION 1 PONT

Option la plus sécuritaire, généralement recommandée pour la plupart des patients et des transferts.



## OPTION 2 - JAMBES SÉPARÉES

Cette position écarte les jambes du patient et n'est pas recommandée pour les patients dont les hanches sont fragiles ou pour ceux qui ont une prothèse à la hanche. Il s'agit d'une position recommandée pour la toilette du patient.



## OPTION 3 AMPUTÉ

Cette position n'est pas recommandée pour des patients agités ou souffrants d'infirmité motrice cérébrale et procure un support adéquat pour les personnes amputées sous le genou.

## Caractéristiques de la toile combi

Caractéristiques	Avantages
Tissu en polyester souple	Tissu ultra souple et confortable, spécialement conçue pour durer longtemps, facile à manipuler et à installer sur un lit.
Courroies solides en nylon/ polyester avec boucles de positionnement	Permet différentes positions (assise, semi-inclinée, ou inclinée) et de plus grandes possibilités d'ajustement en fonction des patients.
Courroie spécialement conçue pour les jambes	Assure la sécurité des patients, même lorsque ceux-ci sont agités. Position des jambes ajustable.
Fils de renfort afin de répartir le poids	Distribue également le poids dans la toile, aucun point de pression ou de pincement.
Support pour la tête	Idéal pour la plupart des transferts (environ 80%), puisqu'il offre un support complet au patient.
Charge maximale d'utilisation de 272 kg (600 lb)	Solide et durable, la toile assure la sécurité du patient.
Lavable à la machine	Simple à entretenir et à nettoyer.