


TOILE STATION DEBOUT #3003

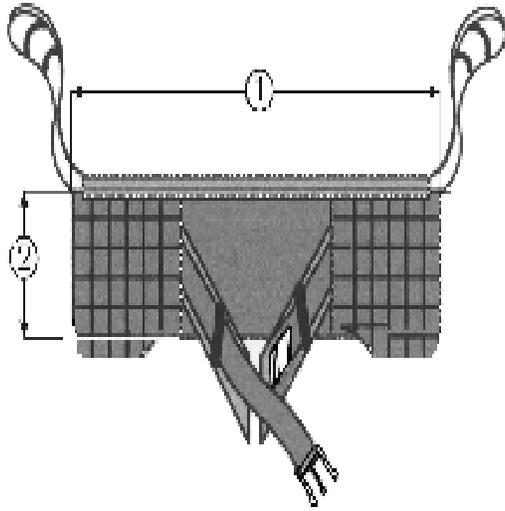

GRANDEUR DE LA TOILE	COULEUR DU PREMIER CROCHET	DIMENSIONS APPROXIMATIVES		
		1 (pce/cm)	2 (pce/cm)	
EXTRA PETIT	BLEU MARIN	36/90	9/22.5	
PETIT	ROUGE	38/95	10/25	
MOYEN	VERT	40/100	10/25	
GRAND	JAUNE	42/105	10/25	
EXTRA GRAND	BLEU ROYAL	43/107.5	10/25	

ENTRETIEN DE LA TOILE

INSPECTER AVEC SOIN AVANT CHAQUE USAGE

- S'assurer que la toile est adaptée au besoin du bénéficiaire (modèle, grandeur, poids)
- Examiner la toile à intervalles réguliers tel que prescrit
- Suivre les instructions d'installation
- Un usage normal et en suivant les instructions de lavage et de séchage prolonge la durée de vie de la toile.

LAVAGE ET DE SÉCHAGE DE LA TOILE

 Laver à la machine à l'eau tiède avec un **savon doux** à **basse température ne dépassant pas 25°C ou 90°F** pendant au moins **trois minutes**.



Ne pas utiliser de javellisant et de chlorure.



Ne pas sécher à la sècheuse. Sécher à une **température maximale de 25°C ou 90°F**.

NE PAS APPLIQUER DE PRESSION MÉCANIQUE OU TOUTE AUTRE PRESSION. NE PAS TORDRE LE TISSU.



Ne pas repasser.