


MANUEL D'UTILISATION FUSION XC

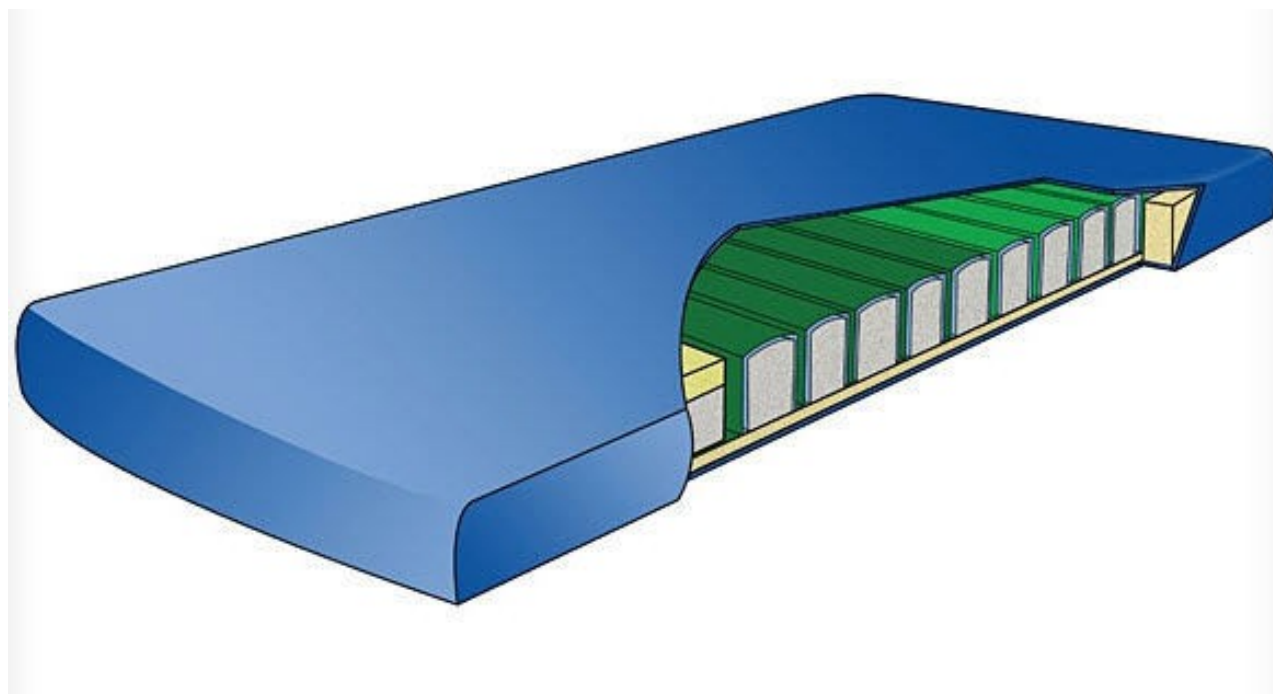

FUSION TM **XC**
Featuring Dynamic DispersionTM

Préparé pour: **MOXI Enterprises, LLC.**



1939 South Vandeventer Avenue, Saint Louis, Missouri 63110

www.moxiusa.com

Toll Free: 1.800.942.7678

Local: 314.771.5222 • Fax: 314.771.5225

permobil

Distribué au Canada par

Permobil

2221 46e avenue, Lachine, Québec, H8T 3C9

T: 1-800-265-9830 | F: 1-877-636-8944

www.permobil.ca

Table des Matières

	Page
Introduction	1
Consignes de sécurité	1
Configuration du Fusion XC	2
Spécifications	2
Caractéristiques	3
Fusion XC avec couche visqueuse	6
Entretien et désinfection	7
Garantie	7

INTRODUCTION

Le Fusion XC de la compagnie Moxi Enterprises est indiqué pour la prévention et le traitement des lésions cutanées, maximiser le confort lors des soins palliatifs, et autres.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation de côté de lit en conjonction avec n'importe quel système de matelas FUSION XC doit être déterminée basée sur la mise en place d'un protocole, les lois et règlements applicables et les considérations individuelles de la sécurité des utilisateurs. L'utilisation de côté de lit n'est pas obligatoire pour l'exploitation fonctionnelle du produit FUSION XC, mais les exigences de sécurité individuels et / ou un protocole installation peut dicter que des rails latéraux doivent être utilisés.

CONFIGURATION DU FUSION XC

Le système est livré complet.

Placer Le Fusion XC directement sur un cadre de lit de taille appropriée

SPÉCIFICATIONS

Limite de poids : 500 lbs (226,8 Kg)

Dimension : 36 x 80 x 6 pouces / 36 x 84 x 6 pouces

Housse : De qualité supérieure, imperméable, ignifuge, extensible, Résistante à la moisissure et au développement des bactéries, et perméable à l'air

Poids : 32 lbs (14,5Kg)

Medicare Code E0373

Group II

CARACTÉRISTIQUES

Le Fusion XC est une surface d'appui de remplacement réactive. Il utilise la technologie certifiée de Dispersion Dynamique.



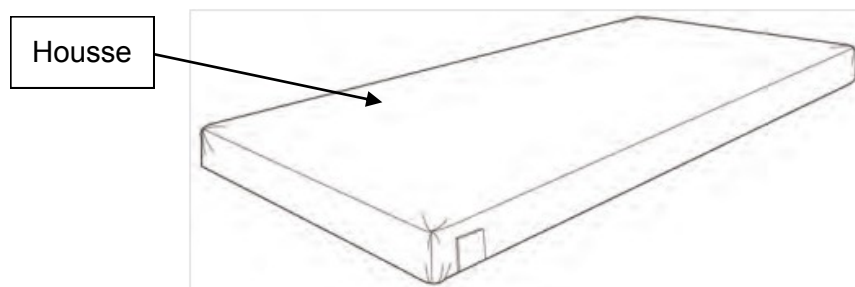


Figure 1

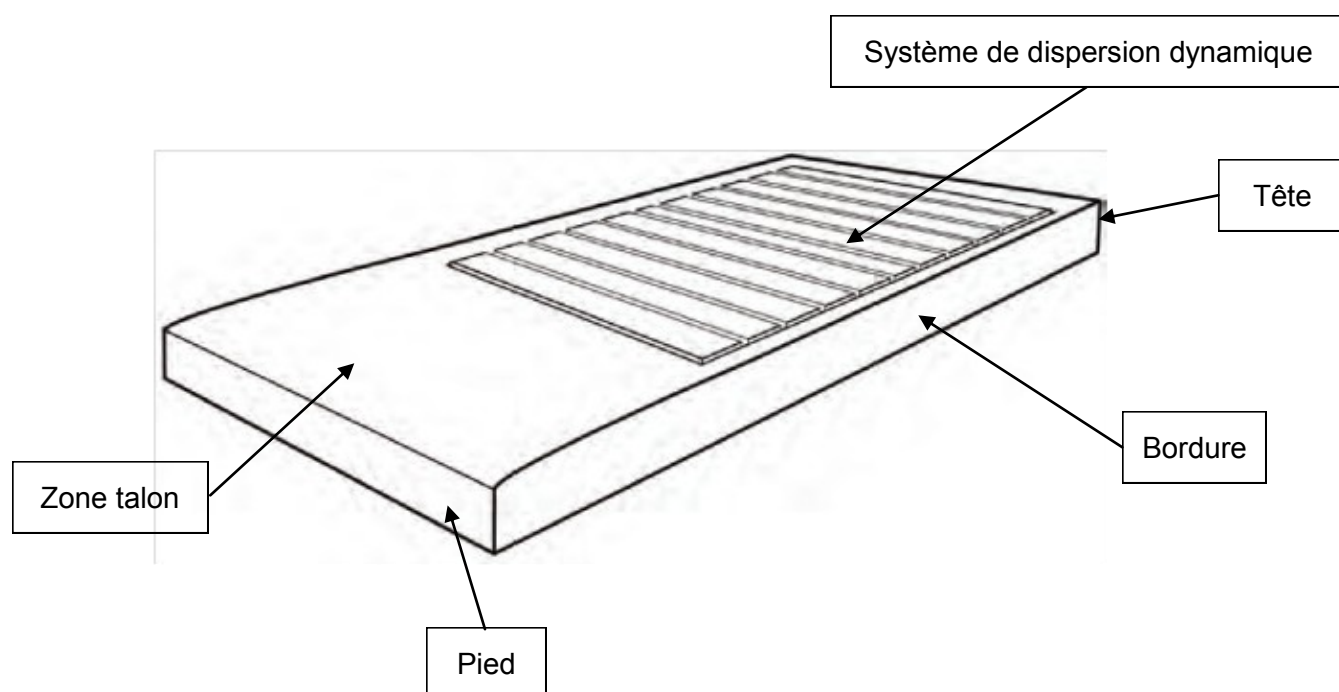

Système de dispersion dynamique

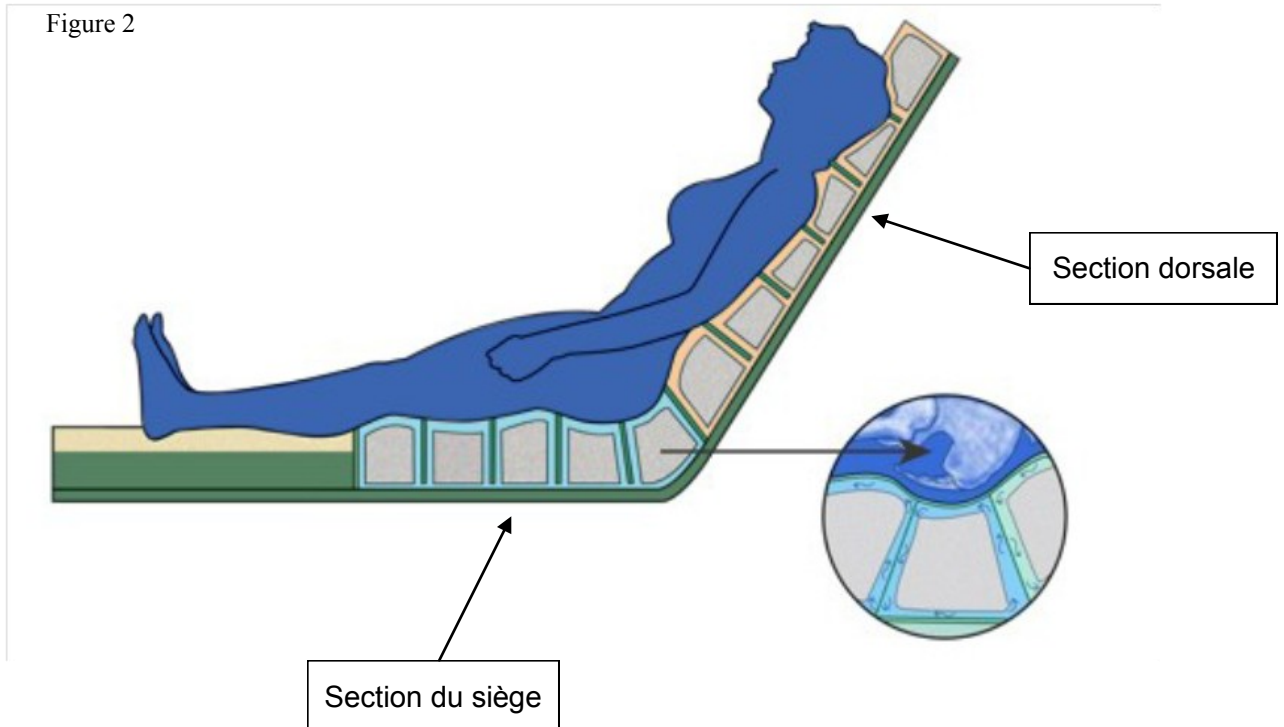

Chaque section du système de dispersion dynamique est composée de cellules horizontales dans lesquelles une mousse haute résilience et de l'air sont encapsulés. Chaque section est indépendante, et chacune des cellules d'une même section communiquent ensemble pour permettre à l'air de circuler et ainsi redistribuer les pressions du patient de manière égale sur la surface d'appui.

Ce système dit « fermé » enveloppe et distribue la pression d'une manière semblable aux technologies de cellules d'air. L'air demeure toujours à l'intérieur des cellules. Chaque changement de position crée un nouvel ajustement personnalisé.

Longévité durable

Les cellules d'air scellées sont préréglées et ne nécessitent aucun réglage additionnel. Le support d'air offre une thérapie et confort et améliore l'espérance de vie de la mousse en supportant la majorité du poids du patient.

De plus, la conception modulaire permet de remplacer des sections usagées ou endommagées.

Zone talon

La zone talon est composée d'une mousse visqueuse pour réduire les pressions et les cisaillements sur cette région à risque.

Le Fusion XC est disponible avec ou sans pente

Bordure


Fusion XC offre une bordure ferme pour faciliter les transferts et une meilleure stabilité en position assise

Figure 3



FUSION XC AVEC COUCHE VISCOSE (MOUSSE MÉMOIRE)

Figure 4

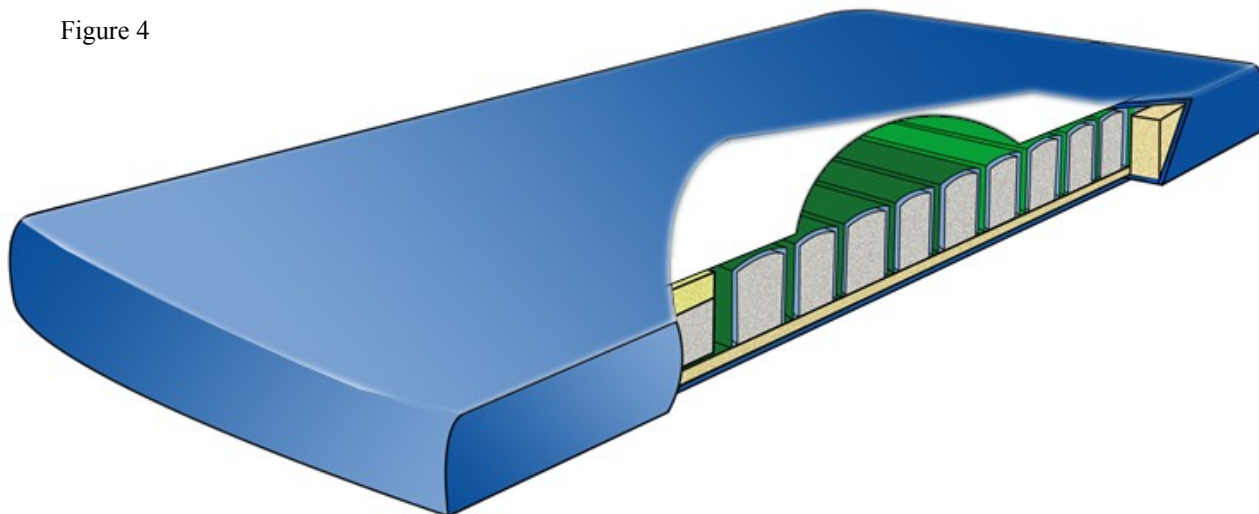

Pour améliorer le confort de certains patients, FUSION XC est disponible avec une couche de visqueuse (mousse mémoire) pleine longueur.

ENTRETIEN ET DÉSINFECTION

La housse peut être nettoyée avec une solution de nettoyage antibactérien doux

Ne pas utiliser de produits chimiques, d'alcool ou de solvants agressifs. Ceci aurait pour effet d'endommager la housse

Respecter les concentrations proposées des différents produits de nettoyage et de désinfection

Vaporiser la surface d'appui avec la solution. Moxi recommande le LpHse dilué à 1/256

Ne pas laisser la solution sur le matelas plus de 10 minutes

Rincer à l'eau claire

Essayer et sécher à l'aide d'un chiffon doux

GARANTIE

MOXI offre une garantie limitée de 5 ans sur les composants du FUSION XC, et une garantie de 1 an sur la housse.



MOXI Enterprises, LLC.

1939 South Vandeventer Avenue, Saint Louis, Missouri 63110

www.moxiusa.com

Toll Free: 1.800.942.7678

Local: 314.771.5222 • Fax: 314.771.5225